

PCL COVID19 Ag Gold Saliva Test Antigenico Rapido Salivare per SARS-CoV-2

Test salivare rapido per la rilevazione qualitativa dell'antigene SARS-CoV-2 (Ag) a partire da un **campione di saliva**. Il test indica se **è in atto un'infezione** da SARS-CoV-2.

È un **IVD** supportato da studi clinici, registrato al **Ministero della Salute** ed in **banca dati farmacie**.

Caratteristiche Tecniche del Test:

- **Marcatura CE**
- Affidabile, ad alte prestazioni (**Sensibilità: 94,29%, Specificità: 100%**)
- **Test ad uso medico-professionale**
- Soluzione accessibile per effettuare **test su larga scala direttamente al punto di prelievo**
- Risposta rapida: risultati in **10 minuti**
- Shelf-life: 24 mesi
- **Il kit è composto da: 1 provetta con reagente di estrazione, 1 test card, 1 beccuccio contagocce**




Il test salivare rapido è utile perchè:

- NON è INVASIVO
- comodo e semplice da usare
- elimina lo stretto contatto con l'operatore sanitario riducendo il rischio di esposizione virale.
- **COMPLEMENTARE** ai classici tamponi antigenici, può essere eseguito per:
 - avere una risposta in tempi brevi su un elevato numero di soggetti direttamente al sito del prelievo;
 - screening domiciliare;
 - screening di comunità (uffici, scuole, RSA, etc.);

persone con co-morposita, etc.);

- laddove vi siano difficoltà nella procedura del tampone rinofaringeo per limiti anatomici o per scarsa collaborazione del paziente

Procedura

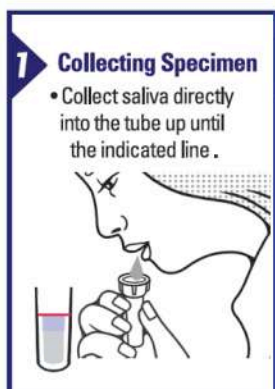


Raccogliere la saliva direttamente all'interno della provetta con il reagente di estrazione, fino alla linea indicata



Posizionare correttamente il beccuccio contagocce sulla provetta e agitare bene per 10 volte



Aggiungere 2-3 gocce della soluzione nel pozzetto di raccolta

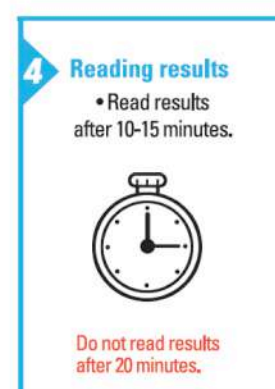

Attendere 10 minuti per il risultato

Leggere attentamente il foglietto illustrativo prima di procedere con l'esecuzione del test.

Interpretazione dei risultati

	INTERPRETAZIONE	RACCOMANDAZIONI
Test Positivo 	<p>Altamente probabile che ci sia un'infezione da COVID-19 in corso. Il soggetto, asintomatico o meno, è da considerarsi contagioso.</p>	<p>La diagnosi deve essere confermata dal test molecolare quantitativo (PCR) e devono essere avviati immediatamente i protocolli del SSN, delle Regioni e delle ASL locali.</p>
Test negativo 	<p>Non sono stati rilevati antigeni virali nel tampone analizzato. Il soggetto probabilmente non è infetto oppure la carica è inferiore al limite di rilevazione.</p>	<p>Se il risultato del test è negativo e i sintomi clinici persistono si raccomanda di ripetere il test o di ricorrere ad un altro metodo di indagine.</p>
Test non valido 	<p>Test non valido</p>	<p>Il risultato non valido indica che la procedura non è corretta o che il dispositivo di prova è scaduto o non è valido. Ripetere il test con un nuovo dispositivo di prova. Se il problema persiste, interrompere immediatamente l'utilizzo del kit di questo numero di lotto e contattare il distributore locale.</p>
Test non valido 	<p>Test non valido</p>	<p>Il risultato non valido indica che la procedura non è corretta o che il dispositivo di prova è scaduto o non è valido. Ripetere il test con un nuovo dispositivo di prova. Se il problema persiste, interrompere immediatamente l'utilizzo del kit di questo numero di lotto e contattare il distributore locale.</p>

Per ordini e dettagli contattaci all'indirizzo: ordini-farma@gwe.it